

## Handgelenk- und Ellbogenbandage



### Anlegen der Bandage

Streifen Sie die Bandage über das Handgelenk bzw. den Ellbogen. Achten Sie darauf, das Gestrick nicht mit Fingernägeln oder scharfkantigen Ringen etc. zu beschädigen. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, auf gerade Maschenreihen und stülpen Sie die Bandage nicht um.

### Kontraindikationen

Arterielle Verschlusskrankheiten, lymphatische Abflussstörungen



Form	Art. Nr.
<b>C-C1</b> Handgelenkbandage Länge 8 cm	235 HG
<b>D-F</b> Ellbogenbandage	235 EL DF

**Materialzusammensetzung** siehe Textiletikett

## Kniebandage



Genu Kniebandage

### Anlegen der Bandage

Streifen Sie die Bandage über das Kniegelenk. Die Verwendung von Compressana Handschuhen mit Griffflächen oder von Talkumpuder erleichtern das Anlegen. Achten Sie darauf, das Gestrick nicht mit Fingernägeln oder scharfkantigen Ringen etc. zu beschädigen. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, auf gerade Maschenreihen und stülpen Sie die Bandage nicht um. Bei der Genu Kniebandage achten Sie besonders auf korrekten Sitz des Knie-scheibenpolsters.

### Kontraindikationen

Arterielle Verschlusskrankheiten, alle Formen der Varikosis, postthrombotische Zustände, Ulcerationen, rezente oder rezidive Thrombophlebitiden, permanente Unterschenkelödeme – gegebenenfalls kann die Kombination mit einem Kompressionsstrumpf das Tragen einer Kniegelenkbandage bei diesen Kontraindikationen ermöglichen.



Form	Art. Nr.
<b>D-F</b> Kniebandage	0507
<b>D-F</b> Genu Kniebandage mit seitlichen Spiralen und Patella-Polstern	0500

**Materialzusammensetzung** siehe Textiletikett

## Sprunggelenkbandage



Malleo Sprunggelenkbandage

### Anlegen der Bandage

Streifen Sie die Bandage über das Sprunggelenk. Achten Sie auf korrekten Sitz der Druckpolster in den Knöchelgruben. Die Verwendung der Compressana Gleitsocke, von Compressana Handschuhen mit Griffflächen oder von Talkumpuder erleichtern das Anlegen. Achten Sie darauf, das Gestrick nicht mit Fingernägeln oder scharfkantigen Ringen etc. zu beschädigen. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, auf gerade Maschenreihen und stülpen Sie die Bandage nicht um. Verhornte Haut und raues Schuhwerk beeinträchtigen die Haltbarkeit des Materials.

### Kontraindikationen

Arterielle Verschlusskrankheiten



Form	Art. Nr.
<b>A-B</b> Sprunggelenkbandage	0509
<b>A-B</b> Malleo Sprunggelenkbandage mit Druckpolster in den Bisgaard'schen Kulissen	0505

**Materialzusammensetzung** siehe Textiletikett



### Materialzusammensetzung

Die genauen Angaben entnehmen Sie bitte dem Etikett, das in Ihren Kompressionsprodukten eingenäht ist. COMPRESSANA Kompressionsprodukte sind latexfrei und ohne Gummi.

### Entsorgung

Es bestehen keine besonderen Kriterien zur Entsorgung. Kompressionsprodukte können über den Hausmüll entsorgt werden.

### Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Hersteller

**REF** Art. Nr.



Charge



Gebrauchsanweisung beachten



Verwendbar bis



Achtung! Hinweise beachten



Kompressionsärmel



Handbandage/  
Fingerling



Handgelenkbandage



Ellbogenbandage



Kniebandagen



Sprunggelenk-  
bandagen

COMPRESSANA



Compressana GmbH · Böhmerwaldstraße 3 · 93073 Neutraubling · Germany  
Telefon: 0 94 01 / 9 22 60 · Fax: 0 94 01 / 92 26 20  
E-Mail: info@compressana.de · www.compressana.de



© COMPRESSANA GmbH · Art.Nr. 0790 · 07/17



**Gebrauchs- und  
Pflegeanleitung  
für Bandagen**

# ALLGEMEINE HINWEISE

## Anziehhinweise

COMPRESSANA GRIP Spezialhandschuhe vereinfachen das Anlegen der Kompressionsprodukte erheblich. Durch griffige Handinnenflächen und eine besondere Oberflächenstruktur kann das Gestrück etappenweise nach oben gestreift werden. Ebenso einfach können Sie mit diesen Spezialhandschuhen den Sitz der Kompressionsprodukte nachträglich korrigieren oder Falten und Verdrehungen beseitigen. Zudem wird das Material beim Anziehen vor Beschädigungen (z.B. durch scharfkantige Fingernägel oder Schmuck) geschützt. Sorgen Sie für einen faltenfreien Sitz und vermeiden Sie Überdehnungen.

Stülpen Sie die Kompressionsprodukte niemals um.

Überstehende Flächen oder Schlingen an der Innenseite sind technisch bedingt und sollten nicht abgeschnitten werden, da sonst Löcher oder Laufmaschen entstehen können.

## Nützliche Tipps

Lassen Sie Ihre Kompressionsprodukte in regelmäßigen Abständen, spätestens nach 6 Monaten, in Ihrer Apotheke oder Ihrem Fachgeschäft kontrollieren. Somit sichern Sie die Qualität und medizinische Wirkung.

Verwenden Sie die hautfreundliche COMPRESSANA Klebelotion zur Befestigung und zum Schutz vor Verrutschen. Die Klebelotion kann auf der Haut in allen Bereichen angewandt werden, die vom Gestrück abgedeckt sind. Bei Haftbändern nicht im Bereich der Silikonbeschichtung anwenden. COMPRESSANA-Produkte können in Kombination mit Hautpflegepräparaten verwendet werden, sofern das Präparat vollständig

eingezogen ist. Regenerierende Pflege und Reinigung gegen trockene, raue, schuppige Haut, sowie zur Vorbeugung und Behandlung von Hautirritationen bzw. zur Linderung von Juckreiz bietet Ihnen die Hautpflegeserie COMPRESSANA SKIN CARE.

Ausgewähltes Zubehör von COMPRESSANA erhalten Sie in Ihrer Apotheke, dem Sanitätsfachhandel oder im Internet unter [www.compressana.de](http://www.compressana.de)

## Hinweise für Haftbänder

Die COMPRESSANA HYDRO LOTION oder die COMPRESSANA VLIES Pflegetücher sorgen für besseren Halt und eignen sich auch zur Anwendung auf der Haut im Bereich von Silikonhaftbändern. Sie schützen sensible Haut vor mechanischen Reizungen und Irritationen, fördern die Hautregeneration und spenden langanhaltend Feuchtigkeit.

## Anwendungshinweise

Medizinische Kompressionsprodukte dürfen nicht bei offenen Wunden angezogen oder getragen werden. Sofern Kompressionsprodukte bei offenen Wunden verordnet werden, ist für eine fachgerechte Wundbehandlung und -abdeckung zu sorgen. Kompressionsprodukte sind in der Regel während der Nachtruhe bzw. bei längerem Liegen nicht zu tragen, es sei denn, der Arzt empfiehlt es oder verordnet explizit eine spezielle Nachtversorgung.

Gegebenenfalls hat Ihr Arzt Druckpötlotten zum Einlegen oder zur Einarbeitung verordnet. Die Anwendung von Kompressionspelotten, Silikonauflagen oder anderweitigem Polstermaterial dient der Erzielung eines einheitlichen Drucks, der Druckerhöhung bzw. der Vermeidung von Druckspitzen und Einschnürungen oder der Narbenbe-

handlung. Die Handhabung und Pflege erfolgt nach Anweisung des Arztes oder medizinischen Fachpersonals.

Aus therapeutischen Gründen sollten Kompressionsprodukte bereits am Morgen nach dem Aufstehen angelegt werden. Die Beine/Arme sind dann entstaut bzw. die Umfänge am geringsten. Zur Sicherstellung des Therapieerfolges wird die regelmäßige, tägliche Anwendung empfohlen und die Neuverordnung/ Neubeschaffung spätestens nach 6 Monaten, sofern die Erkrankung dies erfordert. Zusätzliche Bewegung, gymnastische bzw. physiotherapeutisch angeleitete Übungen unterstützen die wohltuende Wirkung Ihrer COMPRESSANA-Produkte.

## Anziehhilfe

COMPRESSANA EASY ÄRMEL ermöglicht es, Kompressionsärmel problemlos und ohne Reibungswiderstand nach oben zu ziehen und anzulegen. Haut und Gestrück der Strümpfe werden geschont. Anziehhilfen von COMPRESSANA sind verordnungsfähige Hilfsmittel.

Das Video zur Anwendung der Anziehhilfe COMPRESSANA EASY ÄRMEL finden Sie hier:

[www.youtube.com/compressana](http://www.youtube.com/compressana)

## COMPRESSANA Lymphkissen

Positionierungs- und Lagerungshilfe für Arm und Hand in der Entstauungs-, Schmerz- und Wundtherapie. Das COMPRESSANA Lymphkissen ist eine wertvolle Behandlungsunterstützung, speziell im Rahmen der *Komplexen Entstauungstherapie* in Kombination mit Lymphdrainage und/oder Kompressionstherapie. Daneben ist der Einsatz in der Schmerz- und Wundtherapie möglich.

## Haltbarkeit

Bei Raumtemperatur und trocken lagern. Vermeiden Sie Hitze und Feuchtigkeit. Bei Beachtung aller Hinweise aus dieser Broschüre gelten für die Haltbarkeit Ihrer Kompressionsprodukte die folgenden Richtwerte: 6 Monate maximale Tragezeit. Maximale Lagerfähigkeit für Serienanfertigungen: siehe Packungsetikett.

**Wenden Sie sich bitte bei Beschädigungen an Ihren Fachhändler oder Ihre Apotheke. Reparieren Sie nicht selbst, dadurch könnte die medizinische Wirkung beeinträchtigt werden.**

## Gewährleistung


Die Gewährleistungsfrist für med. Kompressionsprodukte beträgt 6 Monate bei Gebrauch, jedoch nicht länger als bis zu dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum, da Kompressionsprodukte einer anwendungs- und materialbedingten Alterung und einem natürlichen Verschleiß beim Tragen unterliegen. Maßangefertigte Produkte sollten möglichst direkt nach der Anfertigung angewandt werden und dienen nicht der Lagerung/Aufbewahrung. Sie werden deshalb nicht mit einem Lagerfähigkeitsdatum versehen. Bitte bewahren Sie das Textiletikett und/oder das Packungsetikett auf. Die Gewährleistung/Garantie erstreckt sich auch auf die Verwendung von COMPRESSANA Zubehör und Accessoires.


## Risikoklasse/Medizinprodukte (Richtlinie 93/42/EWG)


Medizinische Kompressionsprodukte sind Medizinprodukte gemäß dem Medizinproduktegesetz und entsprechen der Risikoklasse 1.

## Wasch- und Pflegehinweise


**Vor dem ersten Tragen waschen!** Waschen Sie die Produkte auf links gewendet und möglichst **täglich**. Das Waschen dient nicht nur der Hygiene, sondern stellt auch Form und Spannkraft und damit die volle medizinische Wirkung wieder her.


 In der **Waschmaschine** mit Feinwaschmittel im Schonwaschgang bis 40°C. Wir empfehlen die Verwendung eines COMPRESSANA Wäschebeutel.

 Bei **Handwäsche** vorzugsweise mit COMPRESSANA Feinwaschmittel in handwarmem Wasser. Vor dem Waschen auf links drehen. Gut ausspülen, nicht wringen! Waschen Sie Ihre Strümpfe beim ersten Mal separat.

 **Nicht trocknergeeignet!** An der Luft trocknen, nicht auf der Heizung oder in der prallen Sonne.

 Chemische Reinigung ist **nicht** möglich.

 Chlorbleiche ist **nicht** möglich.

 Bügeln nicht erforderlich. Bügeln auf niedrigster Stufe, nicht heiß bügeln

## Keinen Weichspüler verwenden.

Defektes Schuhwerk oder Einlagen und raue Hornhaut an den Füßen können das Gestrück beschädigen. **Produkte mit Haftband vor dem Waschen auf links drehen.** Sind an Ihren Kompressionsprodukten Klettbinden oder Reißverschlüsse befestigt, schließen Sie diese vor dem Waschen sorgfältig.

**Tipp zum schnellen Trocknen:** Produkte in ein Handtuch wickeln und gut auspressen, z.B. indem Sie sich darauf


stellen und durch das Körpergewicht die Feuchtigkeit aus den Produkten in das Handtuch drücken.

## Kontraindikationen

**Bei Nichtbeachtung der Kontraindikationen wird von COMPRESSANA keine Haftung übernommen.**

**Risiken und Nebenwirkungen:** Tragen Sie medizinische Kompressionsprodukte nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt und beachten Sie die Anweisungen des medizinischen Fachpersonals. Medizinische Kompressionsprodukte können, insbesondere bei unsachgemäßer Handhabung, Hautnekrosen und Druckschäden auf periphere Nerven verursachen. Sollten Schmerzen oder negative Veränderungen (z.B. Hautreizungen) während der verordneten Anwendung auftreten, kontaktieren Sie umgehend Ihren Arzt. Bei Sensibilitätsstörungen und/oder Wundheilungsstörungen (z.B. bei diabetischen Erkrankungen) die eine Hautläsion beinhalten, können Schädigungen vom Patienten unbemerkt entstehen, die schlecht heilen. Patienten dieser Gruppe bedürfen einer besonderen Kontrolle sowie einer gezielten Unterweisung über besondere Risiken und Vorsorgemöglichkeiten. Bei Unverträglichkeiten gegen Materialien und Inhaltsstoffe halten Sie bitte vor Gebrauch Rücksprache mit ihrem Arzt, Ihrer Apotheke oder Ihrem Fachgeschäft. **Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Verletzungen aufgrund unsachgemäßer Handhabung, Nichtbeachtung der Hinweise oder infolge Verwendung von Zubehörprodukten oder Accessoires, die nicht von COMPRESSANA stammen.**

# Kompressionsärmel

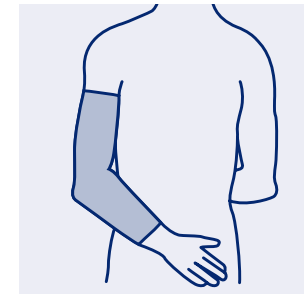


## Anlegen der Ärmel

Stülpen Sie die obere Hälfte des Ärmels über die untere. Den Ärmel mit dem Überschlag über die Hand und weiter über den Arm bis zum Ellbogen ziehen. Stellen Sie dabei sicher, dass der Schulterträger (falls vorhanden) außerhalb verbleibt. Stülpen Sie dann das übergeschlagene Ärmelteil über den Ellbogen, ziehen Stück für Stück in Richtung Schulter. (Schulterträger über den Brustkorb und Rücken legen. Anschließend beide Bandenden verbinden.)


## Hinweis

Ist der Schulterträger zu locker oder zu eng, kann die Länge an der Einstellklemme verändert werden.

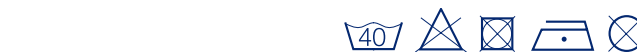

Form		
	<b>C-G</b> <b>C-G max</b>	Ärmel Ärmel mit Haftband (2,5 cm)
	<b>C-H</b> <b>C-H max</b>	Ärmel mit Schultergurt
	<b>C-H</b> <b>C-H max</b>	Ärmel mit BH-Halterung
Materialzusammensetzung siehe Textiletikett		

# Handbandage und Fingerling

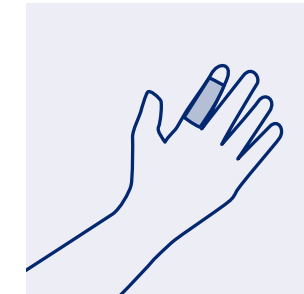

## Anlegen des Handteils

Streifen Sie das Handteil über das Handgelenk. Die Verwendung von Talkumpuder erleichtert das Anlegen. Achten Sie darauf, das Gestrück nicht mit Fingernägeln oder scharfkantigen, Ringen etc. zu beschädigen. Achten Sie auf faltenfreien Sitz, auf gerade Maschenreihen und stülpen Sie das Handteil nicht um.




## Indikationen

Lymphatische Ödeme (z.B. nach Mastektomien beim Mammakarzinom), venöse Stauungen, zur Verbrennungs- und Narbenbehandlung, posttraumatische Schwellungszustände, Paget-von-Schrötter-Syndrom (Axillarvenenthrombose)

## Kontraindikationen

Arterielle Durchblutungsstörung, dekompensierte Herzinsuffizienz



Form		Art. Nr.
	Fingerling 0413	
	Handteil bis C1 mit Daumenansatz	235 HDA
	Handbandage genäht mit Fingeransätzen	0415
Materialzusammensetzung siehe Textiletikett		