

De combinatie van natuurlijke katoen en microvezel maakt **COMPRESSANA Microcotton** zo huidvriendelijk en ademend en zorgt voor een ongeëvenaard draagcomfort en een mooie uitstraling.

- zacht en soepel draagcomfort
- gelijkmatige, ondoorzichtige structuur
- verwent uw benen in de herfst en het winterseizoen

COMPRESSANA Microcotton heeft door de matig intensieve steunwerking (ca. 14 mmHg) een cosmetisch effect op de benen, voorkomt aderproblemen en geeft onzichtbaar vorm. Het resultaat: een beter gevoel en mooiere benen!

Deze kousen en panty's mogen niet worden aangetrokken, maar moeten zoveel mogelijk, zonder te trekken, met de vlakke hand naar boven worden gestreken. Verdeel het breiwerk gelijkmatig over het been. Als de kousen niet meteen goed zitten, kunt u dit nog corrigeren met de speciale handschoenen COMPRESSANA GRIP.

Maat	Panty's & zelfophoudende kousen			Kniekousen	
	Confectiemaat	Gewicht/kg	Maat/cm	Schoenmaat	
II	S	50-60	150-165	35-38	3-5
III	M	58-70	160-175	37-40	4½-6½
IV	L	68-80	165-180	39-42	6-8
V	XL-XXL	> 80	165-185	42-45	8-10½

Microcotton kousen en panty's zijn ook geschikt voor mannen.

Houd rekening met de verschuiving van de confectiematen.

Voor heren geldt: II=XS, III=S, IV=M, V=L-XL.

Onderhoudsinstructies

Een zorgvuldige pedicure verlengt de levensduur van uw kousen. Ringen en scherpe vingernagels kunnen de fijne mazen van de kousen beschadigen. Hetzelfde geldt voor kapotte schoenen.

Ook na vele wasbeurten behouden **CALYPSO-steunkousen** hun mooie uitstraling en hun werkingskracht:

- **Handwas** met een fijnwasmiddel in handwarm water. Goed uitspoelen, niet uitwringen!
- **In de wasmachine** met een fijnwasmiddel op een programma voor de fijne was tot 40°C. Wij raden aan om het COMPRESSANA-waszakje te gebruiken.
- **Drogen:** in een handdoek rollen of op een waslijn hangen. Niet op de verwarming of in de volle zon drogen! Niet in de droogtrommel drogen!

Voor het dragen wassen • binnenstebuiten wassen • geen wasverzachter gebruiken

